

# DENTOSAFE®

## Gebrauchsinformation

Dentosafe®-Zahnrettungsbox zur zeitlich begrenzten Aufbewahrung und dem Transport aus- oder abgebrochener Zähne bzw. Zahnfragmente bis zur Reimplantation

Suchen Sie eine Zahnarztpraxis oder eine Zahn-, Kieferklinik auf, so können Sie mit Dentosafe® Ihren Zahn retten!

Implantation des Zahnes sollte durch einen Zahnarzt nach aktuellem Stand der Technik und des Wissens erfolgen.

### Einsatz der Dentosafe®-Zahnrettungsbox im Notfall:

1. Die Dentosafe®-Zahnrettungsbox ist einsatzfertig. Der Verschluss der Box wird unmittelbar vor Gebrauch abgeschraubt.
2. Der Zahn wird mit der Zahnwurzelspitze nach unten in die Flasche eingelegt.  
**Achtung!** Berühren Sie den Zahn nicht an der Zahnwurzel. Am Zahn haftende Schmutzpartikel vor Eingabe in die Dentosafe®-Zahnrettungsbox nicht entfernen.
3. Die Zahnrettungsbox wird mit dem Schraubverschluss wieder verschlossen. Bitte achten Sie darauf, dass die Zahnrettungsbox dicht verschlossen ist. Sie kann nun problemlos zum Zahnarzt oder in die nächste Zahnklinik transportiert werden.  
**Achtung!** Beim Verschließen der Zahnrettungsbox besteht Klemmgefahr!  
Die Dentosafe® Aufbewahrungslösung erhält die Vitalität der Zellen am Zahn mindestens über 24 Stunden bei Raumtemperatur, als eine Voraussetzung für funktionsgerechtes Wiedereinheilen des Zahnes im Kiefer.
4. Bitte tragen Sie auf dem Flaschenetikett in den dazu vorgesehenen Feldern die Initialen des Patienten ein, dessen Zahn in die Zahnrettungsbox eingegeben wurde, sowie das Datum und die Uhrzeit der Eingabe.



**Achtung!** Die Verweildauer des Zahnes vor Eingabe in Dentosafe® sollte nicht länger als maximal 30 Minuten betragen. Die Wahrscheinlichkeit des dauerhaften Zahnerhalts erhöht sich mit noch kürzeren Rettungszeiten.

# DENTOSAFE®

- **Anwendungsgebiete:**

Dentosafe® dient der Aufbewahrung und dem Transport aus- oder abgebrochener Zähne bzw. Zahnfragmente bis zur Reimplantation.

Bei Dentosafe® handelt es sich um ein Medizinprodukt, das zum einmaligen Gebrauch bestimmt ist und soll unter keinen Umständen wieder verwendet werden.

Durch eine Wiederverwendung ist die Vitalitätserhaltung der Zellen durch eine bereits verschmutzte Aufbewahrungslösung nicht mehr gegeben.

Die Zahnrettungsbox dient zur Aufbewahrung von nur einem Zahn!

**Achtung!** Sollte die Lösung nicht eine rote Farbe haben, ist es ein Hinweis auf eine Überschreitung der Haltbarkeit bzw. auf eine falsche Lagerung. In diesem Fall sollte die Zahnrettungsbox nicht verwendet werden.

Eine beschädigte Zahnrettungsbox sollte nicht verwendet werden.

**Nicht zum Einnehmen.**

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

- **Dauer der Haltbarkeit: Siehe Verfalldatum**

Dentosafe® nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr benutzen.

- **Besondere Lager- und Aufbewahrungshinweise:**

Die Zahnrettungsbox in der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Stand: Oktober 2012

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG,  
Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn,  
Tel. 02371 - 937-0  
Service-Nr. 0180 26 33 423  
Fax: 02371 - 937-239  
e-mail: info@medice.de  
www.medice.de



403000810004

- **Erklärung der Packungssymbole**



siehe Gebrauchsinformation



Verwendbar bis



Chargennummer



Nur zum Einmalgebrauch



0044



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.